

Iskra Medical



CE 0123

RDT[®] system
radial endo dermo therapy system

PATENT ST. 20906




Green VAC

- Аппарат для улучшения микроциркуляции и растяжения тканей при помощи пульсирующего отрицательного давления
- Три аппликатора круглой формы разных диаметров, обеспечивающие образование под колпачком кольцеобразной выпуклости кожи
- Пять стандартных программ и пять свободных программ

Плохое кровообращение и застой лимфатической жидкости способствуют изменениям наружного слоя кожи и подкожных тканей. В последствии в этих частях накапливаются вредные отходы от процессов обмена веществ-шлаки. Соединительная ткань набухает, внешний вид кожи заметно ухудшается. На поверхности кожи появляются впадины и выпуклости, придающие коже вид апельсиновой корки, известные симптомы целюлита.

Новый аппарат **»GREEN VAC«**, отличающийся простым, но эффективным способом применения, представляет собой новый шаг вперед в области ухода и лечения изменений в подкожных тканях. Терапия базируется на пульсирующем отрицательном давлении. Лечение с помощью вакуума уже столетия применяется для улучшения микроциркуляции и растяжения соединительной ткани. Аппликаторы специальной формы с вращающимся шариком в середине, помимо высасывания воздуха, способствуют формированию колцеобразной выпуклости кожи, в которой одновременно происходит массаж и растяжка подкожных слоев. Таким образом усиливается не только прилив свежей крови, но и отлив венозной крови и дренаж лимфатической жидкости. Отрицательное давление способствует растяжению тканей и лизису жировых запасов, накопившихся в подкожном пространстве, что положительно влияет на состояние кожи. Использование аппликаторов разной величины дает возможность проведения терапии на любом критическом участке кожи и на неудобных для доступа местах. Возможность регуляции верхней и нижней величины отрицательного давления допускает применение данной терапии даже на очень чувствительной коже. Скорость пульсации и продолжительность воздействия отрицательного давления допускается регулировать индивидуально. Перед установкой аппликаторов, в кожу можно втереть противоцелюлитный крем. Для обеспечения более гладкого скольжения аппликаторов и их хорошего контакта с поверхностью кожи рекомендуется использовать массажное масло.

Показания для применения аппарата **»GREEN VAC«**: эдематозная стадия целюлита, фиброзная стадия целюлита, рубцовая стадия целюлита, уход и разглаживание морщин на лице, обработка свежих рубцов, келоиды, повреждения подкожной ткани из-за растяжения при беременности или быстром прибавлении веса.

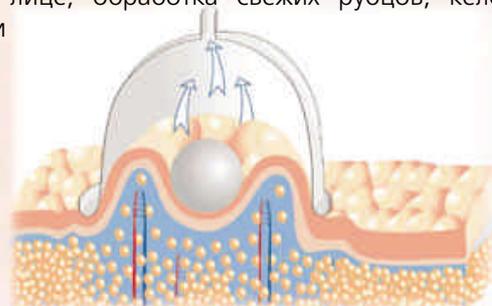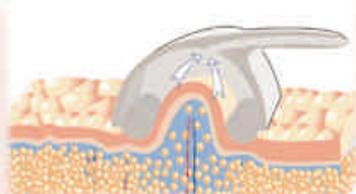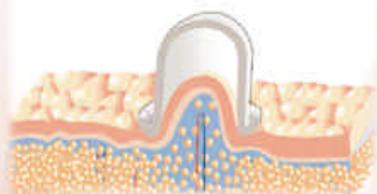

МЕД СОЮЗ
БАНКАММ

+7 (495) 661-52-70

многоканальный
www.medsoyuz.ru

E-mail: ru@medsoyuz.ru



- VPG 80
- VPG 60
- VPG 35
- VPG 25
- VG 25
- VG 20
- VG 15
- VG 10
- VPG
- VG
- KV
- VDPG 50
- VDPG 60
- RAPG 80
- RAPG 60
- RAPG 35
- СК

ТЕРАПИЯ, ОБРАЗУЮЩАЯ
ПРОДОЛЬНУЮ
ВЫПУКЛОСТЬ КОЖИ

- АППЛИКАТОР D80 мм
- АППЛИКАТОР D 60 мм
- АППЛИКАТОР D 35 мм
- АППЛИКАТОР D 25 мм
- АППЛИКАТОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА - СТЕКЛЯННЫЙ D 25 мм
- АППЛИКАТОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА - СТЕКЛЯННЫЙ D 20 мм
- АППЛИКАТОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА - СТЕКЛЯННЫЙ D 15 мм
- АППЛИКАТОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА - СТЕКЛЯННЫЙ D 10 мм
- НАБОР КОЛПАЧКОВЫХ АППЛИКАТОРОВ
- НАБОР СТЕКЛЯННЫХ АППЛИКАТОРОВ
- КОМПЛЕКТ АППЛИКАТОРОВ
- АППЛИКАТОР ДВОЙНОЙ D 80 мм
- АППЛИКАТОР ДВОЙНОЙ D 60 мм
- АППЛИКАТОР РАДИАЛЬНЫЙ D 80 мм
- АППЛИКАТОР РАДИАЛЬНЫЙ D 60 мм
- АППЛИКАТОР РАДИАЛЬНЫЙ D 35 мм
- ПОДСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБОЧКИ

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ
МЕТОД С КОЛЬЦЕОБРАЗНОЙ
ВЫПУКЛОСТЬЮ КОЖИ

»RDT SYSTEM - GREEN VAC« VDPG 80



Технические данные:

Тип аппарата: GREEN VAC
Сетевое напряжение: 230 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 150 ВА
Тип предохранителей: 2 x 1,6 АТ
Масса аппарата: 6 кг
Масса чемоданчика с компл. аппликаторов: 4 кг
Корпус: полистироловый PS 06

Цвет корпус: светлосерый
Габаритные размеры: 400 x 350 x 180 мм
Класс безопасности: I

Тип аппликационной части: BF
Классификация по MDD: IIa
93/42/ЕЕС:
Число подсоединений: 8
Отрицательное давление: от 0 до 500 кПа,
Продолжительность массажа: 0-99 мин.
Продолжительность макс. отрицательного давления: 0 - 60 с
Продолжительность отрицательного давления: 0 - 60 с
мин. отрицательно давления:
Число стандартных программ: 5 - заложенных в память аппарата
Число свободных программ: 5

AF 25

AF 20

AF 15

AF 11

AF 8

Стандартное оборудование в чемоданчике:
комплект аппликаторов - 15 шт.
подсоединительные трубки - 2 шт.
электрошнур 1 шт.
массажное масло - 1 шт.
Инструкция по применению