



Iskra Medical



**Medio CRYO**

CE 0123

- Аппарат для обработки участков кожи теплом или холодом при помощи специального излучателя
- Настройка температуры охлаждения от 25°C до 3°C
- Настройка температуры нагрева от 25°C до 50°C
- Возможность контроля заданной температуры в обрабатываемой ткани
- С удобным излучателем площадью 5 см<sup>2</sup>
- Портативный вариант в отдельном чемоданчике



Аппарат **»MEDIO CRYO«** - портативный, удобный в применении и практичный. Пользуясь им можно забыть про холодильник, забитый криокомпрессами и о постоянном подогревании термопаков на рекомендуемую температуру. **»MEDIO CRYO«** предусмотрен для обработки участков тела либо теплом, либо холодом. Соответствующая температура устанавливается индивидуально. Температуру охлаждения или нагрева ткани можно постоянно контролировать. Благодаря этой возможности не возникают побочные эффекты из-за перегрева или слишком сильного охлаждения обрабатываемого участка тела. Во время терапии холодом не появляется капание воды, характерное для охлаждения льдом. Удобный для применения излучатель водят по обрабатываемой

поверхности, предварительно смазанной гелем.

При лечении теплом нет боязни в нанесении ожогов, отпадает также необходимость в применении защитных покрывал. Обрабатываемую поверхность смазывают гелем, обеспечивающим более мягкое скольжение излучателя. В зависимости от разновидности заболевания, лечебный эффект от нагрева или охлаждения тканей проявляется в виде снижения боли, уменьшения спазма мышцы, улучшения кровообращения.

Обработка пораженного участка теплом способствует улучшению двигательной способности суставов, ускоряет целебные процессы, повышает скорость передачи импульсов по нервным волокнам.

Применение более низких температур снижает воспаление суставов и обмен веществ, уменьшает отеки и неприятные последствия в тканях после повреждения.

Воздействие на пораженные участки тела теплом рекомендуется перед выполнением активных или пассивных упражнений, перед проведением электротерапии, массажа и растяжения, перед ультразвуковой терапией.

Воздействие на пораженные участки тела холодом рекомендуется немедленно после повреждения, при наличии острых болей, ожогах, перед фрикционным массажем в процедуре RICE.

#### **Технические данные:**

Тип аппарата:	MEDIO CRYO
Сетевое напряжение:	230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность:	100ВА
Тип предохранителей:	2x1,6 АТ
Масса аппарата:	7 кг
Корпус:	полистироловый PS 06
Цвет корпус:	светло серый
Габаритные размеры:	350x420x170 мм
Класс безопасности:	I
Тип аппликационной части:	BF
Классификация по MDD 93/42/ЕЕС:	Pa
Температура охлаждения:	25°C до 3°C, регулируемая
Температура обогрева:	25°C до 50°C, регулируемая
Продолжительность терапии:	1 - 99 мин., регулируемая
Индикатор для измерения охлаждающей жидкости:	встроен
Инструкция по применению	